

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE

SYSTÈME
D'ÉCLAIRCISSEMENT
À DOMICILE

- Solutions d'éclaircissement
sûres, efficaces sous
votre régie

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

CAVEX

CAVEX BITE&WHITE

De plus en plus de patients recherchent un moyen efficace, sûr et sans douleur pour éclaircir leurs dents. Cavex a développé dans ce but des systèmes d'éclaircissement à domicile sous la régie du dentiste.

Le gel d'éclaircissement de l'ABC Masterkit est à base de peroxyde de carbamide à 16 %. Ready 2 Use contient du peroxyde d'hydrogène supérieur (HPS) à 6 %. L'Impact Kit utilise l'ingrédient actif qu'est le peroxyde polyvinylpyrrolidone (PVP).

Avant et après traitement avec l'ABC Masterkit



Avant: A4



Après: B1

Les produits Cavex Bite&White ont un pH neutre. Livrés et expliqués par le dentiste, ces systèmes sont entièrement conformes à la législation et réglementation européennes. En résumé, ce sont des systèmes d'éclaircissement à domicile aux résultats efficaces, sans risque et sans sensibilité.

Explications techniques:

Lors d'un éclaircissement, le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) se décompose en eau (H_2O) et en oxygène (O_2). Les radicaux libérés lors de cette réaction décomposent les éléments de grandes molécules colorées en petites molécules incolores. Répété plusieurs fois, ce processus aboutit à la décomposition de toutes les molécules colorées et à l'élimination de la coloration des dents du patient qui rayonnent ainsi d'une blancheur naturelle.


PREMIUM WHITENING

ABC MASTERKIT

Votre patient recherche-t-il un résultat complet et durable avec une sensibilité minimale ?

Dans ce cas, optez pour l'ABC Masterkit : le traitement d'éclaircissement le plus efficace et complet avec des gouttières sur mesure.

L'ABC Masterkit est un système en 3 étapes:

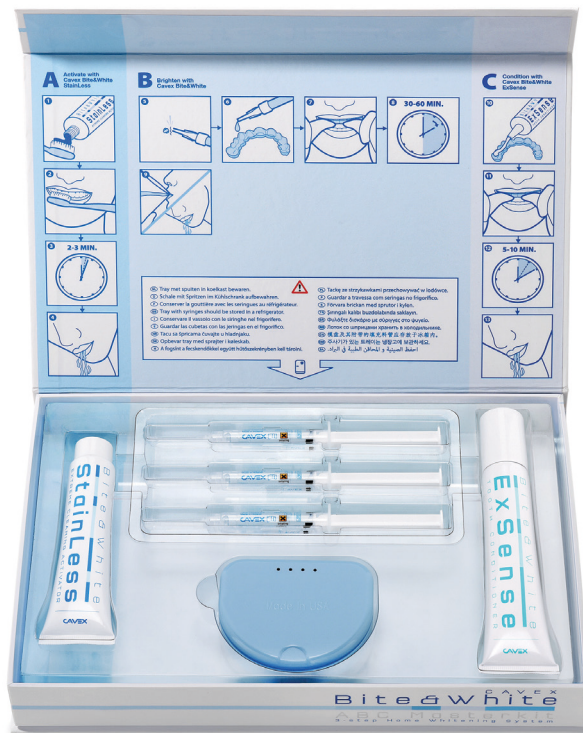

A

-
ACTIVER avec Cavex Bite&White StainLess (2 - 3 minutes)

Cette pâte nettoie soigneusement la surface de la dent de sorte que le gel d'éclaircissement entre directement en contact avec l'émail. D'autre part, StainLess augmente le pH dans la bouche et accélère ainsi l'action du gel d'éclaircissement.

B

-
ÉCLAIRCIR avec Cavex Bite&White gel (30 - 60 minutes)

Le gel d'éclaircissement contient du peroxyde de carbamide à 16 %, soit l'équivalent de peroxyde d'hydrogène à 6 %. Les propriétés thixotropiques idéales du gel assurent une répartition parfaite sur la surface des dents tout en empêchant que le gel n'atteigne les collets et les gencives pour prévenir la sensibilité dentaire. Le fluorure de sodium ajouté renforce l'émail et le nitrate de potassium minimise toute sensibilité.

C

-
TRAITER avec Cavex Bite&White ExSense (5 - 10 minutes)

La composition unique d'hydroxyapatite avec un sol hydrodispersant scelle les tubuli et microfissures de l'émail, minimisant la sensibilité. En outre, ExSense contribue à la reminéralisation et restaure la microdureté des dents.

ACTIVER - ÉCLAIRCIR - TRAITER

STAINLESS

A L'ABC Masterkit contient un tube de la pâte StainLess qui est utilisée avant le gel d'éclaircissement pour optimiser encore davantage l'efficacité du traitement d'éclaircissement. StainLess est également disponible séparément.

La pâte StainLess nettoie les dents en profondeur tout en épargant l'émail et la dentine. Grâce à ce nettoyage efficace, le gel d'éclaircissement entre directement en contact avec l'émail dentaire. De plus, StainLess augmente provisoirement le pH dans la bouche, accélérant l'action du peroxyde d'hydrogène. Les molécules colorées se désintègrent plus rapidement lorsque le pH est plus élevé, ce qui réduit la durée de la séance d'éclaircissement.

Caractéristiques du produit

- Nettoie les dents en éliminant la plaque et les taches superficielles
- Augmente provisoirement le pH dans la bouche pour un résultat encore plus rapide

Comment l'utiliser ?

Avant l'éclaircissement, broser pendant 2-3 minutes avec Cavex Bite&White StainLess et ne pas rincer.



A C T I V E R - É C L A I R C I R - T R A I T E R

P R E M I U M W H I T E N I N G

W H I T E N I N G G E L

B Ce gel d'éclaircissement sûr et efficace contient du peroxyde de carbamide à 16 % (= peroxyde d'hydrogène à 6 %)

Le gel livré en seringues peut facilement être appliqué à l'aide des gouttières d'éclaircissement*. Le gel d'éclaircissement s'écoule parfaitement autour des dents, mais n'atteint pas les collets ni les gencives grâce à ses propriétés thixotropiques. Ainsi, le résultat d'éclaircissement est uniforme et le risque de sensibilité minime.

Caractéristiques du produit

- Peroxyde de carbamide à 16 % (= peroxyde d'hydrogène à 6 %)
- Le fluorure de sodium renforce l'émail
- Le nitrate de potassium minimise toute sensibilité
- Propriétés thixotropiques idéales

Comment l'utiliser ?

Le gel en seringue s'applique facilement dans les gouttières d'éclaircissement pour les mâchoires supérieure et inférieure. Verser une goutte de la taille d'une tête d'épingle dans la gouttière pour chaque dent. Le patient garde ensuite les gouttières en bouche pendant 30 à 60 minutes.

*non incluses, à livrer séparément.



A C T I V E R - É C L A I R C I R - T R A I T E R

CAVEX

EXSENSE

C Ce gel unique s'applique, après l'éclaircissement, en tant que dernière étape de l'ABC Masterkit pour prévenir toute sensibilité.

Il apporte un soulagement rapide et durable en cas de dents sensibles. La composition unique d'hydroxyapatite avec un sol hydrodispersant pénètre en profondeur dans les tubuli et microfissures de l'émail et scelle ainsi entièrement les zones sensibles.

En outre, grâce à l'ajout de nitrate de potassium à 0,1 %, ExSense restaure la microdureté des dents. Il offre ainsi une protection durable contre la sensibilité dentaire.

Caractéristiques du produit

- Profonde pénétration de l'hydroxyapatite dans les tubuli et microfissures
- Prévient et réduit la sensibilité dentaire
- Accélère le processus de reminéralisation
- Goût agréable

Comment l'utiliser ?

Après l'éclaircissement, rincer les gouttières à l'eau et les garnir de Cavex Bite&White ExSense. Maintenir ensuite les gouttières en bouche pendant 5-10 minutes. Recracher tout résidu, mais ne pas rincer ensuite pour un meilleur résultat.



A C T I V E R - É C L A I R C I R - T R A I T E R

PREMIUM WHITENING

READY 2 USE

Votre patient recherche-t-il un traitement d'éclaircissement rapide, efficace et simple ?

Dans ce cas, Ready 2 Use est un bon choix. Ready 2 Use agit ultra-rapidement et, comme son nom l'indique, est prêt à l'emploi. Les gouttières d'éclaircissement universelles sont pré-remplies. Le gel d'éclaircissement est pH neutre et contient du peroxyde d'hydrogène supérieur (HPS) à 6 %.

Le gel d'éclaircissement HPS agit plus rapidement que tout autre produit contenant du peroxyde d'hydrogène. En effet, l'HPS est à base du peroxyde d'hydrogène le plus pur et décompose plus rapidement les molécules colorées. Comme le gel hautement visqueux devient plus ferme pendant le traitement, il reste bien en place. Il est ainsi constamment en contact avec les dents. Ready 2 Use peut être conservé à température ambiante car l'HPS est très stable.

Comment l'utiliser ?

Les gouttières d'éclaircissement universelles sont pré-remplies de gel d'éclaircissement. Le patient garde les gouttières en bouche pendant 15 minutes. Répéter une fois par jour pendant huit jours consécutifs.

Caractéristiques du produit

- 8 gouttières universelles pré-remplies pour éclaircir pendant 8 jours, 15 minutes par jour
- HPS à 6 % pour un éclaircissement plus rapide et plus efficace
- Peut être conservé à température ambiante
- Gel hautement visqueux pour une répartition uniforme sur et entre les dents
- pH neutre



IMPACT KIT

Votre patient recherche-t-il un kit facile à utiliser soi-même ?

L'Impact Kit offre cette possibilité. Le kit comprend une gouttière double-face qui peut être personnalisée facilement et un tube contenant suffisamment de gel d'éclaircissement pour environ vingt séances d'éclaircissement. Ce duo constitue un traitement d'éclaircissement facile et efficace.

Une des caractéristiques de ce produit est que le gel est stable sur le plan thermique. Bien pratique car cela permet un gain de place dans les réfrigérateur. Le secret de cette stabilité est un gel au peroxyde polyvinylpyrrolidone (PVP). En outre, les propriétés thixotropiques du peroxyde PVP font en sorte que le gel reste parfaitement en place pour un résultat d'éclaircissement uniforme.

Comment l'utiliser ?

La gouttière thermoplastique est plongée dans de l'eau chaude pendant une minute. Le patient place ensuite la gouttière d'éclaircissement dans sa bouche et la modèle à l'aide de ses doigts pour l'ajuster autour des dents. Puis, le patient applique le gel d'éclaircissement en ligne dans le haut et le bas de la gouttière qu'il garde en bouche 30 à 60 minutes. Le traitement peut être répété chaque jour jusqu'à obtention du résultat d'éclaircissement souhaité.

Caractéristiques du produit

- Eclaircit les dents des mâchoires supérieure et inférieure simultanément en seulement 30-60 minutes par jour
- Gel d'éclaircissement en quantité suffisante pour jusqu'à 20 séances de éclaircissement.
- Peroxyde PVP à 6 % pour la stabilité
- Peut être conservé à température ambiante
- pH neutre



PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE

-
Solutions
d'éclaircissement sûres,
efficaces et sans
douleur sous votre
régie

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX



CAVEX

-
**Solutions d'éclaircissement
sûres, efficaces et sans douleur
sous votre régie**

Cavex Bite&White est un traitement cosmétique non-invasif pour l'éclaircissement des dents. Le peroxyde d'hydrogène constitue la base de tout traitement d'éclaircissement efficace. Les produits Cavex Bite&White contiennent exclusivement du peroxyde d'hydrogène pur qui est stabilisé afin de pouvoir garantir leur efficacité pour une longue durée.

**Commandez l'assortiment
Cavex Bite&White auprès de
votre dépôt.**



Cavex Bite&White ABC Masterkit
(n° art BW090)

- 3 x 3 ml Cavex Bite&White gel
- 1 x 35 ml Cavex Bite&White StainLess
- 1 x 42 ml Cavex Bite&White ExSense
- étui de gouttière d'éclaircissement
- guide des teintes
- mode d'emploi



Cavex Bite&White 3 Syringes (n° art BW007)

- 3 x 3 ml Cavex Bite&White gel et mode d'emploi

PREMIUM WHITENING



Cavex Bite&White Ready 2 Use
(n° art BW031)

- 8 x gouttière d'éclaircissement pré-remplie (3 ml), guide des teintes et mode d'emploi



Cavex Bite&White Ready 2 Use Bulk
(n° art BW036)

- 30 x gouttière pré-remplie (3 ml) et mode d'emploi



Cavex Bite&White StainLess (n° art BW070)

- 1 x tube de 35 ml



Cavex Bite&White Refill (recharge)
(n° art BW010)

- 1 x 3 ml Cavex Bite&White gel et mode d'emploi



Cavex Bite&White Bulk Refill (recharge)
(n° art BW015)

- 10 x 3 ml Cavex Bite&White gel et mode d'emploi



Cavex Bite&White Impact Kit
(n° art BW040)

- 1 x tube de 40 g de gel, 1 x gouttière de éclaircissement Boil&Bite et mode d'emploi

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Cavex | Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays-Bas | cavex.nl

Laboratoires PRED | 79 avenue Aristide Briand | 94118 |
Arcueil Cedex | France | +33141983400 | pred.fr

The Cavex logo consists of the word "CAVEX" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a horizontal line through its center.

in proud partnership with

The Pred logo features a green square icon containing a white tooth silhouette. To the right of the icon, the word "PRED" is written in a bold, green, sans-serif font, with "LABORATOIRES" in a smaller, black, sans-serif font underneath.

ZYW105PRED.01