


Cavex Bite&White IMPACT

DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE PVP* RÉVOLUTIONNAIRE

C'est avec grande fierté que nous vous présentons le **premier produit d'éclaircissement au peroxyde pratiquement insensible à la température** : Cavex Bite&White Impact. Ce produit d'éclaircissement dentaire révolutionnaire contenant la substance active PVP (polyvinylpyrrolidone) sera lancé dans un kit complet pour usage à domicile. Le gel n'est pas administré à l'aide d'une seringue, mais **d'un tube, ce qui lui donne une sensation plus cosmétique**. En combinaison avec la gouttière Boil&Bite double face et le mode d'emploi ingénieux, ce kit offre une expérience d'éclaircissement à domicile incomparable.

* La **PVP** (polyvinylpyrrolidone) est un polymère contenant un groupe carbonyle amide comportant un accepteur de liaison hydrogène puissant. De ce fait, le peroxyde d'hydrogène, qui est un puissant donneur d'hydrogène, peut former un complexe stable. L'énorme avantage de ce produit est son **excellente stabilité, même à température ambiante**, lorsqu'il est utilisé dans des compositions anhydres. La réaction n'est initiée qu'en présence

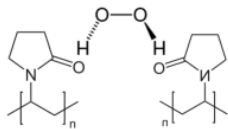

d'eau, en l'occurrence lorsque le produit entre en contact avec la salive de la bouche.

Une fois dans la bouche, la PVP affiche une réaction très rapide de désintégration et de libération de peroxyde d'hydrogène. La réaction est encore plus rapide lorsque la température augmente, en raison de la température de la bouche de 32 °C.

Pourquoi le fait que le produit est pratiquement insensible à la température est-il important ? Pour de nombreuses raisons, à vrai dire. Premièrement, l'expédition vers des pays au climat chaud est bien moins critique que pour les gels de peroxyde « normaux », qui doivent rester frais. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de conserver ce produit au réfrigérateur, ce qui libère bien de l'espace dans votre réfrigérateur ou celui du dentiste et du patient. Et que dire par exemple de la possibilité de proposer ce produit en vente libre dans les drogueries, les pharmacies et autres, aux côtés de tous les autres produits cosmétiques non réfrigérés ? Vous aussi, vous flairez les bonnes affaires ?



NOUVEAU



CAVEX

■ Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Pays-bas

T +31 (0)23 530 77 00
F +31 (0)23 535 64 82
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

We get Smiles



PRED
LABORATOIRES

Tél.: 01 41 98 34 04
www.pred.fr