


# Ultra X\*



## PROTOCOLE

- Préparer le canal radiculaire jusqu'à la taille requise à l'aide d'instruments de mise en forme et de finition
- Choisissez le désinfectant et les agents de rinçage souhaités pour le nettoyage, le débridement et la désinfection des canaux
- Remplissez la solution d'irrigation choisie dans le canal, ne faites jamais fonctionner Ultra X sans solution d'irrigation
- L'embout doit être de la taille et de la longueur souhaitées qui s'insère dans le canal, gardez toujours 2 à 3 mm de moins que l'apex
- Activez la solution en effectuant de courts mouvements verticaux de haut en bas pendant 30s. Ne pas dépasser les 2mm apicaux
- Utilisez l'appareil avec précaution et n'appliquez jamais de pression ni ne coincez l'embout à l'intérieur du canal. S'il y a des points de résistance, alors récupérez la pointe ultrasonique
- Remplissez la solution d'irrigation et utilisez l'aspiration pour enlever les débris en vrac. Répétez le cycle 4 à 5 fois
- Séchez complètement le canal et remplissez-le avec le choix du matériau d'obturation
- Il est toujours recommandé d'isoler la dent à l'aide d'une digue en caoutchouc et d'utiliser des barrières de protection personnelles comme un casque, un masque, des lunettes, etc.

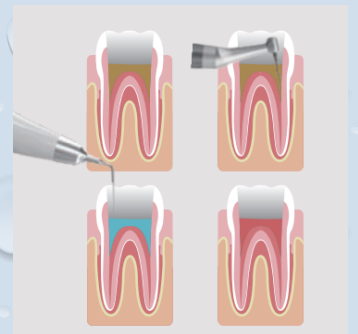

**Référence** : ULTRAX

\*Ultra X est un dispositif médical de classe I fabriqué par Changzou Sifary Medical Technology Co., Ltd. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires Pred.