

Isi Soft®

La simplicité d'une séquence de 3 instruments.
Les avantages du traitement thermique **T-WIRE**.
Résistance et sécurité en plus.



Notre service clients est à votre écoute :

☎ 01.04.98.34.04

✉ info@pred.fr

🌐 www.pred.fr



Séquence Isi Soft



Acteur depuis plus de 40 ans sur le marché du dentaire, les Laboratoires PRED sont spécialistes de la vente des produits dentaires à usage professionnel, et possèdent plus de 35 ans d'expertise dans les biomatériaux.

Nous œuvrons aux côtés de nos partenaires autour d'une démarche minimalement invasive en proposant des produits de qualité.

Isi Open®* Ø20 - 25mm - 4%

Instrument de sécurisation canalaire



Isi Safe®* Ø25 - 25mm - 5%

Instrument de mise en forme



Isi Finish®* Ø35 - 25mm - 4%

Instrument de finition apicale



Protocole Isi

grâce à une dynamique opératoire facilitée

Traitement thermique T-WIRE

ce qui améliore la flexibilité et la résistance


Démarche minimalement invasive

grâce au fil d'1 mm

Instruments Stériles

*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123). Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

Évasement Coronaire OPTIONNEL

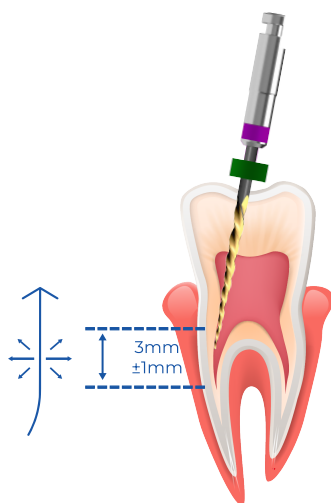

Dynamique opératoire

Très faible pression apicale après utilisation d'un instrument.
Cathétérisme manuel.
Technique de pénétration avec un mouvement dit « en vague ».
Une fois le niveau de pénétration atteint, utilisation avec un mouvement d'appui pariétal.

*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123).
Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

Sécurisation Canalaire



Dynamique opératoire

Descente en 3 mouvements successifs « en vague »
centrés dans le canal, de la couronne vers l'apex.
Atteinte de la LT.

*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123).
Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

Isi Safe®*
Ø25 - 25mm - 5%

Nettoyer et mettre en forme les canaux



Dynamique opératoire

Descente en 3 mouvements successifs « en vague »
centrés dans le canal, de la couronne vers l'apex.
Atteinte de la LT.

*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123).
Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

Isi Finish®*
Ø35 - 25mm - 4%

Finition apicale



Dynamique opératoire

Descente « en vague ».
Remontée en appui pariétal afin de finaliser
le nettoyage et la mise en forme du canal.
Irrigation abondante.

*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123).
Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

CANAUX FINS

Au préalable, jaugeage du canal avec une lime Kn10

1 Isi Open

Ø20 - 25mm - 4%



2 Isi Safe

Ø25 - 25mm - 5%



+ Isi Finish⁽¹⁾

Ø35 - 25mm - 4%



CANAUX MEDIUMS

Au préalable, jaugeage du canal avec une lime Kn15

1 Isi Safe

Ø25 - 25mm - 5%



+ Isi Finish⁽¹⁾

Ø35 - 25mm - 4%



CANAUX LARGES

Au préalable, jaugeage du canal avec une lime Kn15


1 Isi Safe

Ø25 - 25mm - 5%



2 Isi Finish

Ø35 - 25mm - 4%

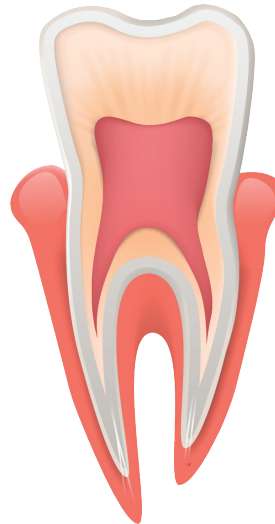

(1) Optionnel

Indication : mise en forme des canaux radiculaires pendant un traitement endodontique non chirurgical

Références produits

Isi Flare®*

Ø25 - 17mm - 9%

1 plaquette de 5 instruments

Référence : 66091



Isi Finish®*

Ø35 - 25mm - 4%

1 plaquette de 5 instruments

Référence : 66094



Isi Open®*

Ø20 - 25mm - 4%

1 plaquette de 5 instruments

Référence : 66092



Isi Safe®*

Ø25 - 25mm - 5%

1 plaquette de 5 instruments

Référence : 66093



Séquence Isi Soft®

1 Open + 1 Safe + 1 Finish

1 plaquette de 3 instruments

Référence : 66095



*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123).

Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

*Dispositif médical stérile de classe IIa fabriqué par Dent4you AG et importé par Micro-Mega SA. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE (Organisme notificateur CE 0123).

Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.