


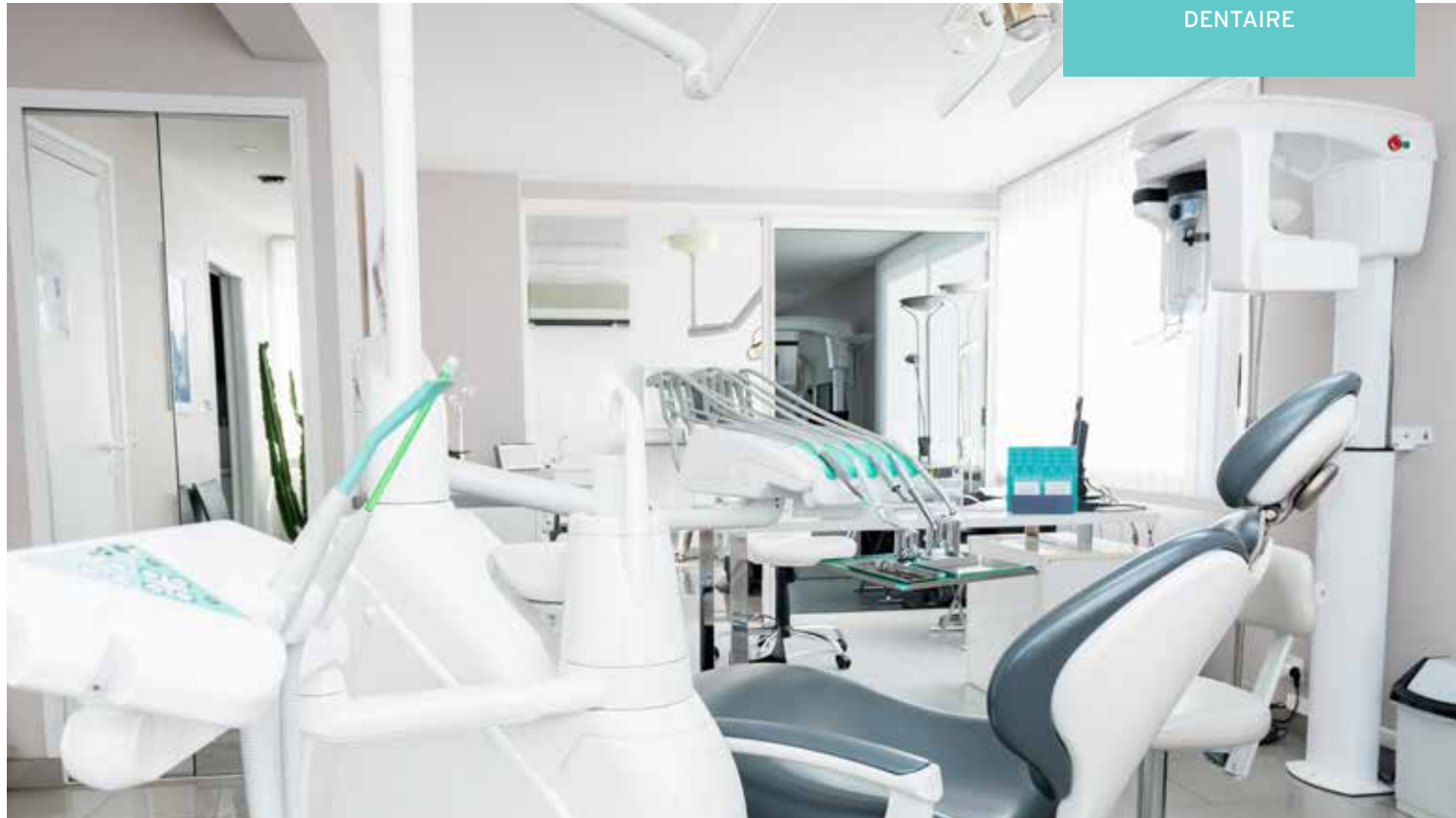

SOLUTION DÉSINFECTANTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN MILIEU DENTAIRE

DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

SOLUTION DÉSINFECTANTE

Désinfectant à action rapide du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool en environnement dentaire.

Solution prête à l'emploi

- A base d'éthanol
- Large spectre antimicrobien et temps de contact court
- Ne laisse pas de traces au séchage
- Parfum agréable
- Sans colorant



DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

Solution désinfectante

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES


- Solution prête à l'emploi
- Limpide incolore
- Densité : env 0,9
- pH à 20°C : env 5,5

MODE D'EMPLOI


Prêt à l'emploi




S'utilise sur les dispositifs médicaux préalablement nettoyés. Vérifier avant application la compatibilité des zones à traiter avec l'alcool. Les appareils électriques à désinfecter seront hors tension.

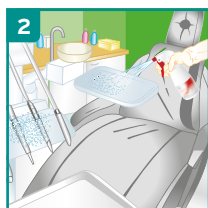

Pulvériser sur les zones à traiter jusqu'à ce qu'elles soient totalement humectées. Appliquer en quantité suffisante (+/- 40 ml/m²). Tout le dispositif doit être imprégné de produit.

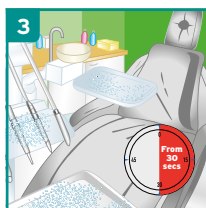

Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf pour les zones destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses.

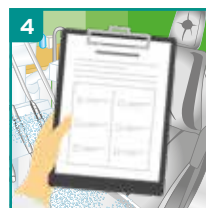

Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour la désinfection des dispositifs médicaux.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉS/CONDITIONS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide selon EN 13697*/EN 13727*	30 sec
Levuricide selon EN 13697*/EN 13624*	30 sec
Fongicide selon EN 13697*/EN 13624*	5 min
Tuberculocide selon EN 14348*	30 sec
Mycobactéricide selon EN 14348*	5 min
Active sur les virus enveloppés selon EN 14476*/EN 16777*	30 sec
Virucide à spectre limité selon EN 14476*/EN 16777*	5 min
Adenovirus	30 sec
Norovirus (MNV)	5 min

* Conditions de propreté

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCES
Dentasept Spray 60 Pro	3 Spray pulvérisateurs de 1 L	2475500R8
Dentasept Spray 60 Pro	1 Bidon de 5 L	2475042R8



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATIONS

Désinfection rapide du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool en milieu dentaire.

MODE D'EMPLOI

Prête à l'emploi

1. S'utilise sur les dispositifs médicaux préalablement nettoyés. Vérifier avant application la compatibilité des zones à traiter avec l'alcool. Les appareils électriques à désinfecter seront hors tension.
2. Pulvériser sur les zones à traiter jusqu'à ce qu'elles soient totalement humectées. Appliquer en quantité suffisante (+/- 40 ml/m²). Tout le dispositif doit être imprégné de produit.
3. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf pour les zones destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses.
4. Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place. Veuillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour la désinfection des dispositifs médicaux.

COMPOSITION

Ethanol, propionate de N,N-didécy-N-méthyl-poly(oxyéthyl) ammonium, parfum.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes de Dentasept Spray 60 Pro est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage : entre +5°C et +25°C.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com