



Desserte pour scanner - Montage

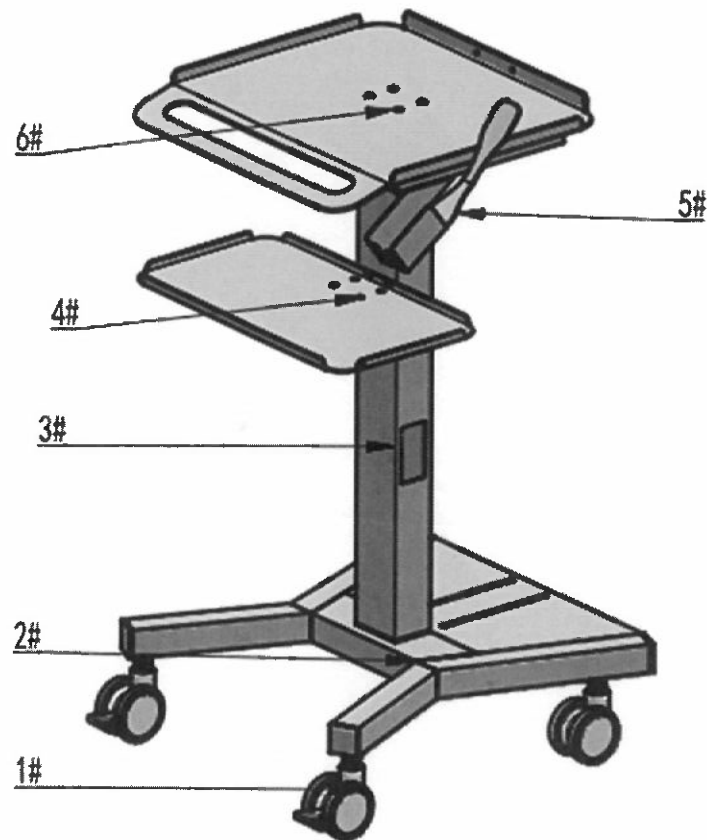

1、 Roues 1 # et base 2 #: Prendre les roues 1 # et la base 2 #; Sortir les rondelles 12MM plates et ressorts; Sortir la clé plate. Placer la rondelle ressort 12MM et la plate 12MM en séquence sur l'embout de la base 1 #,


et utiliser la clé plate pour fixer la roue 1 # sur la base 2 #.

Attention : les roues à frein 1 # doivent être posées devant.

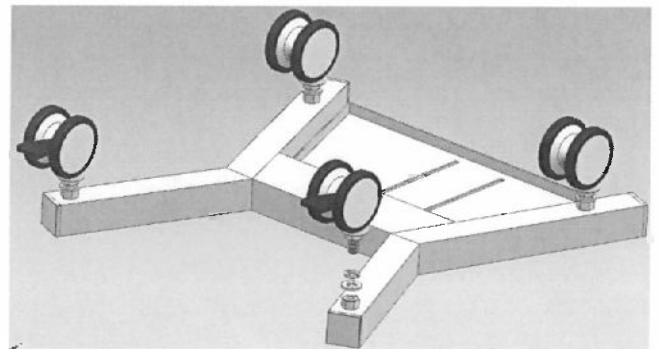


2、 Fixer la colonne 3 # et la base 2 # :

Prendre les 4 vis hexagonales M6X60 à tête cylindrique (avec les rondelles 6MM à ressort plat), et aligner les 4 trous de la colonne 3 # sans les vis avec les 4 trous de la base 2 #. Fixer les vis avec une clé Allen 5MM Allen.

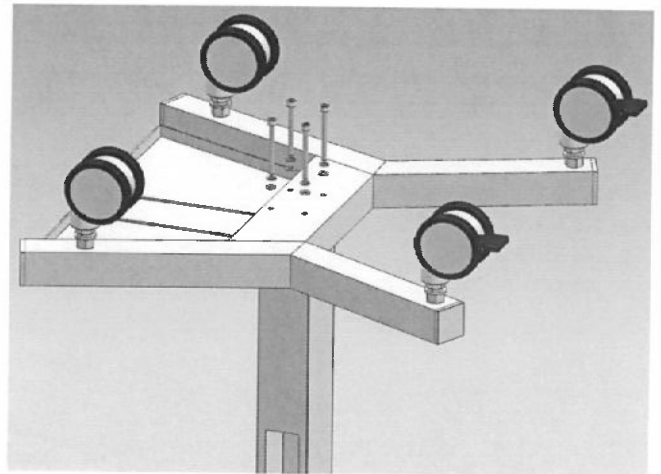


Attention : le devant de la colonne 3 # avec les 6 vis doit être orienté vers l'avant de la base 2 #.

3、 Fixer le plateau 4 # et la colonne 3 # : utiliser la clé hexagonale 2.5MM pour retirer les vis hexagonales M4 et les rondelles à ressort plat de la colonne 3. Aligner les 6 trous du plateau 4 # et de la colonne 3 #. Fixer les 6 vis et rondelles avec la clé Allen 2.5MM.

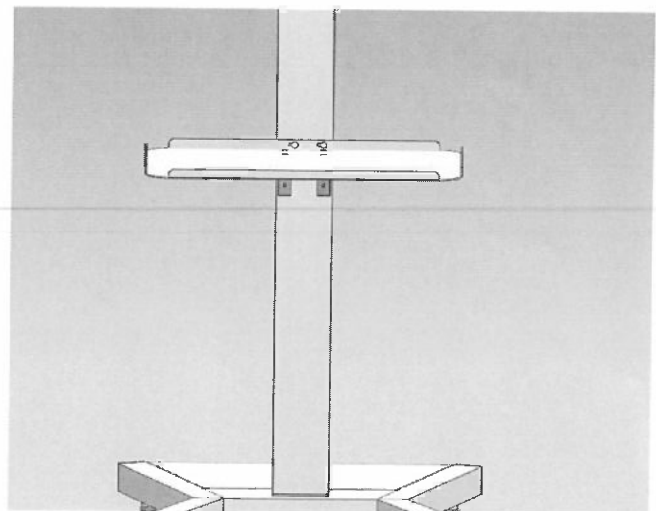


4、 Fixer le plateau 6 # sur la colonne 3 # : Utiliser la clé hexagonale 3MM pour enlever les 4 vis hex à tête plate M5 de la colonne 3 #. Aligner les quatre trous du plateau avec les trous filetés sur le dessus de la colonne 3 #, et utiliser une clé Allen de 3 MM pour fixer le plateau sur la colonne.

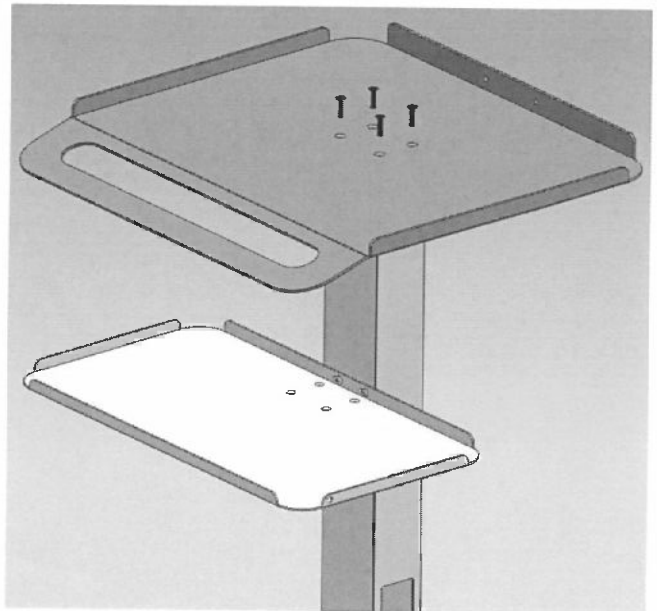

Remarque : L'avant du plateau 6 # avec la poignée doit être aligné avec l'avant de la base 2 #.


5、

Fixer le support de scanner 5 # au plateau 6 # : Desserrer les écrous sur 5 # à la main (sans les détacher). Visser le boulon supérieur du support 5 # dans la rainure

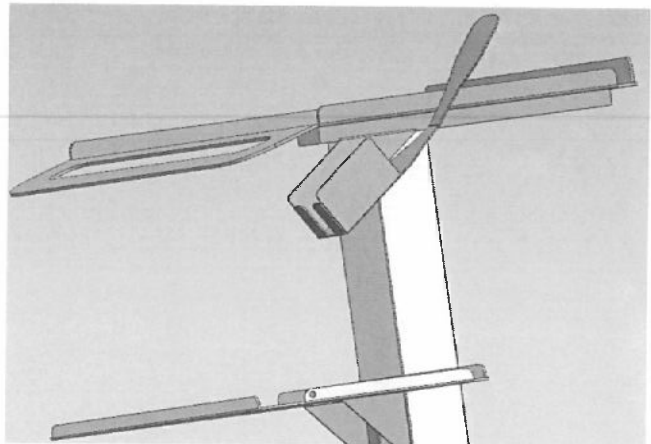

coulissante inférieure droite du plateau 6 # dans l'ordre, l'ajuster à la position appropriée et serrer l'écrou.

6、Cet accessoire est
optionnel.

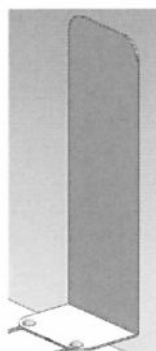

Si vous voulez l'utiliser, retirez les deux boulons à l'arrière de la base 2 # et vissez-les dans les deux trous carrés à l'extrémité inférieure de l'accessoire. Utilisez l'écrou à main inférieur pour connecter les deux. L'accessoire en option



peut être déplacé à la position appropriée et l'écrou peut être verrouillé.

1	Roues	4
2	Base	1
3	Colonne	1
4	Plateau à instruments	1
5	Support de scanner	1
6	Plateau de travail	1
7	Outils	Clé Allen 2.5MM 1 Clé Allen 3MM 1 Clé Allen 5MM 1 Clé plate 1
8	Accessoires	Rondelle plate 12MM 4 Rondelle ressort 12MM 4 Rondelle plate 6MM 4 Rondelle ressort 6MM 4 Rondelle plate 4MM 6 Rondelle ressort 4 MM 6 Vis hexagonale M6X60 4 Vis hexagonale M4 6 Vis hex tête plate M5 4 Autres = accessoires de rechange.