

■ Foam 2 Wipes Unisepta®



Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (exemples : unit dentaire, corps de lampe à photo polymériser...).

Caractéristiques principales

- Solution d'imprégnation formulée sans alcool
- Temps de contact : 2 - 5 minutes
- Lingettes en viscose - 100% biodégradable
- Sans parfum ni autre substance allergène
- Idéal pour le traitement du fauteuil dentaire
- Dimensions : 180 x 200mm
- Pack distributeur de 100 lingettes

■ Foam 2 Wipes Unisepta®

Protocole d'utilisation

Avant utilisation

Porter des gants appropriés.



Retirer la lingette du sachet.



Appliquer la lingette sur la zone à traiter.



Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf si le dispositif médical entre en contact avec la peau ou les muqueuses.




S'assurer que le sachet est bien refermé après chaque utilisation.

Précautions

Dangereux : respecter les précautions d'emploi (établies conformément à la réglementation européenne en matière de classification et étiquetage des produits chimiques). Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations relatives au produit. Conserver entre +5°C et +25°C. Usage professionnel uniquement. Dispositif médical CE 0459.

Spectre d'activité**

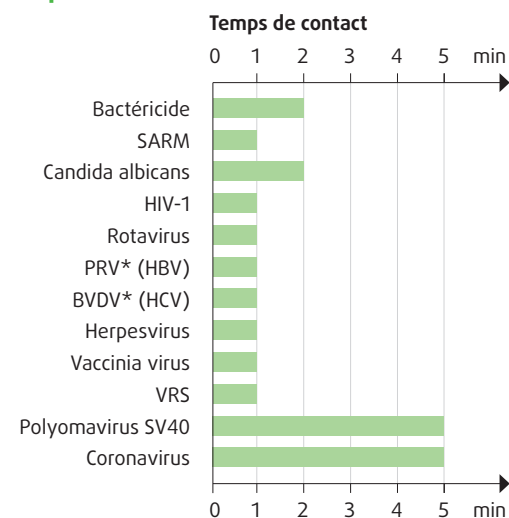

* PRV : Virus modèle de l'Hépatite B

* BVDV : Virus modèle de l'Hépatite C

** Spectre d'activité de la solution d'imprégnation

L'Institut Robert Koch (RKI) recommande l'utilisation de désinfectants avec une activité virucide limitée pour interrompre la chaîne de l'infection. Selon le RKI, une activité virucide limitée (efficace sur les virus enveloppés) correspond à une activité sur Vaccinia virus et BVDV.

Conforme aux normes européennes

La solution d'imprégnation est :

Bactéricide : EN 13727, EN 16615

SARM : EN 13727

Levuricide : EN 13624, EN 16615

Actif sur virus selon EN 14476

Composition

100 g de la solution d'imprégnation contiennent : 0,30 g de chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients.

Données physiques

Lingette en viscose (spunlace non tissé 45gr/m²), 100% biodégradable.

Couleur : Lingette blanche

Parfum : Sans parfum

Conservation : 2 ans (non ouvert)

Conditionnement

	100 lingettes	150 lingettes
Paquet	✓	